



**Instructions for WHITEsmile  
GINGIVA PROTECTOR**



**Die Anwendung von WHITEsmile  
GINGIVA PROTECTOR**



**WHITEsmile GmbH**

Weinheimer Straße 6 · 69488 Birkenau · Germany

info@whitesmile.com · www.whitesmile.com

© WHITEsmile GmbH · #0126 · Version 1.0 · 03/2007



**Instructions for WHITEsmile  
GINGIVA PROTECTOR**

**Intend of use**

WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR for WHITEsmile POWER BLEACHING. Neighboring teeth can be covered in single tooth whitening treatments.

**Application**

Attach the dispensing tip to the syringe. Dry the gingiva carefully to ensure that the WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR will hold and seal during the whole treatment. Apply the WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR direct on the gingiva and cover 3 – 4 mm of the gingiva and 0.5 – 1 mm of the teeth. Ensure that the gingiva is protected. Now cure the WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR with an UV-lamp for 30 – 40 seconds. After finishing the work remove the material.

**Caution**

Take care not to overheat with the curing light. Do not use by allergy to the constituents. Avoid contact with eyes and skin.



**Storage**

Store at a cool dark place (4 – 25 °C). Do not freeze the gel and protect it from heat and sunlight. Store out of reach of children.

Ingredients: Oligomeric urethane acrylate, Bis-GMA, tripropylene glycol diacrylate, tetrahydrofurfuryl methacrylate, inorganic fillers, photoinitiator.



**Die Anwendung von WHITEsmile  
GINGIVA PROTECTOR**

**Verwendungszweck**

Zahnfleischschutz beim WHITEsmile POWER BLEACHING. Abdeckung umliegender Zähne bei Einzelzahn aufhellung.

**Anwendung**

Ersetzen Sie den Deckel der Spritze durch die beiliegende Kanüle. Trocknen Sie das Zahnfleisch sorgfältig um sicherzustellen, dass der WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR während der gesamten Dauer der Behandlung hält und dicht ist. Verteilen Sie den WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR direkt auf dem Zahnfleisch, so dass 3 – 4 mm der Gingiva und 0,5 – 1 mm des Zahnhalses überdeckt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Zahnfleisch entsprechend geschützt ist. Härten Sie nun den WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR mit einer UV-Lampe für 30 – 40 Sekunden durch eine bogenförmige Bewegung aus. Für kleinere Teilbereiche sind bereits 5 – 10 Sekunden ausreichend. Nach der Behandlung kann das Material abgehoben und an einem Stück entfernt werden.

**Sicherheitshinweise**

Vermeiden Sie eine Überhitzung einzelner Stellen durch zu langes Einwirken der UV-Lampe. Nicht bei bekannten Allergien auf einzelne Inhaltsstoffe verwenden. Vermeiden Sie einen Kontakt mit den Augen ggf. mit viel Wasser spülen.

**Lagerung**

Kühl und dunkel (4 – 25 °C). Nicht gefrieren. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Inhaltsstoffe: Oligomeric urethane acrylate, Bis-GMA, tripropylene glycol diacrylate, tetrahydrofurfuryl methacrylate, inorganic fillers, photoinitiator.